

Dossier avec coussin sur mesure de ROHO® AGILITY® supplément

Fournisseur : Ces instructions doivent être données aux utilisateurs de ce produit.

Opérateur (Individu ou personne soignant(e)) : avant d'utiliser ce produit, lire les instructions et les conserver pour référence future.



Ce document est fourni en tant que supplément aux instructions de fonctionnement incluses avec le système de dossier ROHO AGILITY et le matériel.

Le système de dossier personnalisé ROHO® AGILITY® (système de dossier personnalisé AGILITY) est un dispositif conçu sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques d'un individu. Le clinicien prescripteur devrait être contacté pour toute question concernant l'utilisation prévue de ce produit personnalisé.

Spécifications du Produit

Matériel : caoutchouc néoprène, fabriqué sans latex, Zytel, valve de gonflage, mousse en polyéthylène



Informations pour la Sécurité



Mise en garde : Une exposition prolongée à l'ozone peut détériorer le matériel utilisé pour ce produit, affecter son rendement, et annuler la garantie du produit.

Entrée D'air DRY FLOATATION® : Instructions pour les Ajustements

1. Placez le dossier avec coussin sur mesure AGILITY sur la coque arrière avec les cellules d'air face à l'individu. Utilisez le crochet et les bandes de fixation de la boucle pour fixer le dossier à la coque arrière.
2. Ouvrez la valve. Glissez l'embout de caoutchouc de la pompe à main sur la valve. Gonflez jusqu'à ce que l'entrée d'air commence à se cambrer légèrement. Pincez l'embout de caoutchouc de la pompe à main et fermez la valve. Retirez la pompe à main. (*Répétez le processus pour chaque section de valve jusqu'à ce que la totalité de l'entrée d'air soit gonflée.*)
3. L'individu doit rester assis dans sa position habituelle. Assurez-vous que le dossier est correctement positionné derrière l'individu.
4. Ajustez l'inflation de l'entrée d'air si nécessaire. Assurez-vous qu'il y ait au moins ½ po (1,5 cm) d'air soutenant les proéminences osseuses de l'individu.
5. Assurez-vous que toutes les valves sont fermées une fois l'ajustement complété.

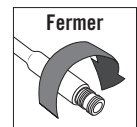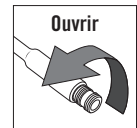

Avertissement: VÉRIFIEZ LE GONFLAGE! Assurez-vous qu'il y ait au moins ½ po (1,5 cm) d'air soutenant les proéminences osseuses de l'individu. Suivez les niveaux d'inflation recommandés par le prescripteur.

Rangement, élimination et recyclage

Rangement : Nettoyer et désinfecter le produit avant de l'entreposer. Ouvrir la(les) valve(s) de gonflement. Dégonfler le produit (détacher toutes les sections du produit). Entreposer le produit dans un contenant qui protège le produit de l'humidité, des contaminants et des dommages.


Élimination : les composantes des produits dans ce guide ne sont associés à aucun risque environnemental lorsqu'ils sont utilisés correctement et lorsque l'on en dispose conformément aux règlements locaux/régionaux. L'incinération doit être faite par un centre de gestion des déchets agréé et qualifié.

Recyclage : contacter une agence de recyclage locale pour déterminer les options de recyclage pour le produit. Pour plus d'information concernant le recyclage, contacter le Service à la clientèle.

Entrée D'air DRY FLOATATION : Nettoyage et Désinfection

Avertissement:

- La(les) valve(s) de gonflage DOIVENT être fermées pour s'assurer que l'eau n'entre pas dans le produit durant le nettoyage et la désinfection.
- Suivre toutes les directives de sécurité sur l'étiquette du fabricant du javellisant et du désinfectant germicide.
- Note au sujet de la stérilisation : Les températures élevées peuvent accélérer le vieillissement du dispositif et endommager l'assemblage du produit. Les produits inclus dans ce guide ne sont pas emballés dans un environnement stérile, ils ne sont pas conçus pour être stérilisés avant utilisation et il n'est pas requis de le faire. Si le protocole de l'institution exige la stérilisation : premièrement, suivre les instructions de nettoyage et de désinfection; puis ouvrir le clapet de gonflage et utiliser la température de stérilisation la plus basse possible sans dépasser 70°C (158°F), durant le plus court laps de temps possible. NE PAS autoclaver.

 Mises en garde: NE PAS laver à la machine ou laver à sec le insertion d'air. Utiliser un des articles suivants pourrait endommager le coussin : abrasifs (laine d'acier, tampons à récurer); caustiques, détergents pour lave-vaisselle automatique; produits contenant des solvants pétroliers ou organiques, y compris de l'acétone, toluène, méthyléthylcétone (MEK), naphta, liquide de nettoyage à sec, dissolvant d'adhésif; lotions à base d'huile, lanoline ou désinfectants à base phénolique; gaz d'ozone; méthodes de nettoyage à lumière ultraviolette.

Pour nettoyer l'entrée d'air: Retirez l'entrée d'air de la couverture et le coussin de mousse, fermez la (les) valve(s) et placez dans un grand évier. Lavez à la main en utilisant du savon à main liquide doux, du savon de vaisselle à main, du détergent à lessive ou un détergent polyvalent (suivre les instructions sur l'étiquette du produit.) Frottez doucement toutes les surfaces du coussin en utilisant une brosse de plastique à poils doux, une éponge ou un chiffon. Rincez abondamment avec de l'eau propre. Faites sécher à l'air. NE PAS exposer directement au soleil.



 Avertissement: Rincer à fond. Les résidus de détergent peuvent faire coller ensemble les cellules d'air.

Pour désinfecter l'entrée d'air: Répétez les instructions de nettoyage en utilisant une part d'eau de javel pour 9 parts d'eau. Gardez le produit mouillé avec la solution d'eau de javel pendant 10 minutes. Rincez abondamment avec de l'eau propre. Faites sécher à l'air.



Garantie Limitée

Durée de la garantie limitée à partir de la date originale d'achat du produit. Entrée d'air DRY FLOATATION à sec : 36 mois; housse et coussinet-mousse: 18 mois. Voir aussi le supplément à propos de la garantie limitée fourni avec votre produit, ou contacter le service à la clientèle.

Information de contact



ROHO, Inc.

Bureaux administratifs: 100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, U.S.A.

Adresse postale/livraison: 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, U.S.A.

États-Unis. : 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Service à la clientèle: orders.roho@permobil.com

Extérieur des États-Unis : 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com

permobilus.com

Les produits peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets et marques de commerce des États-Unis ou d'autres pays, incluant AGILITY® DRY FLOATATION et ROHO®.

L'information sur le produit est changée comme nécessaire; et l'information sur le produit à jour est disponible sur permobilus.com.

ROHO, inc. fait partie de Permobil Seating and Positioning.

Rev. 2018-10-19

© 2013, 2018 Permobil



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

